



Pflegeanleitung für Ihre Sauganlage
mit Orotol® plus & MD 555 cleaner



Tägliche Desinfektion mit Orotol® plus

Mit dem Flüssigkonzentrat Orotol® plus haben Sie die ideale Lösung für die gleichzeitige Desinfektion, Desodorierung, Reinigung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider. Die Anwendung erfolgt nach Behandlungsende, bei höherer Belastung 2 x täglich (mittags und abends).



1 Vorreinigung




2 Liter Wasser absaugen

2 Dosierung 2%



Ansetzen einer 2%-igen Lösung:
1 Liter Wasser + 20 ml Orotol plus

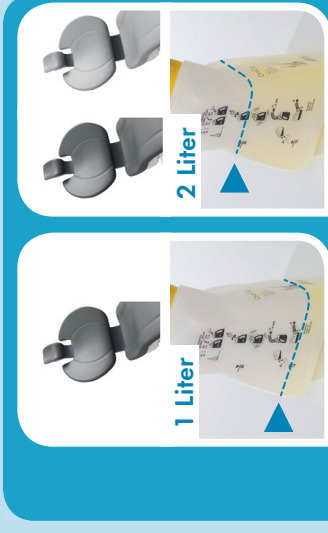

Pro Behandlungseinheit:
1 Liter Wasser + 1 Kappe Orotol® plus (20 ml)
Bei 2 Behandlungseinheiten:
2 Liter Wasser + 2 Kappen Orotol® plus (40 ml)

3 Absaugung




Saugschläuche aufstecken, 1 Liter Lösung pro Behandlungseinheit absaugen

4 Desinfektion Mundspülbecken



Mindestens 250 ml Lösung pro Mundspülbecken

5 Einwirkzeit

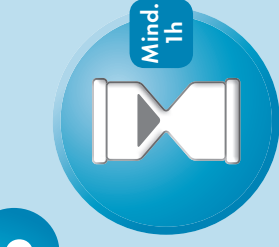

Mind. 1 Stunde einwirken.
Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, fungizid, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV, Noro-Viren)

6 Spülung Behandlungseinheit



Bei Wiederinbetriebnahme 2 Liter Wasser absaugen




Wöchentliche Reinigung mit MD555 cleaner

MD 555 cleaner ist Ihr Spezialreiniger für Sauganlagen und Amalgamabscheider. Er verfügt über starke Reinigungskraft gegen Ablagerungen, Verkrustungen und Verschlämmungen. Die Anwendung erfolgt 1 bis 2 x wöchentlich (z. B. Dienstag und Donnerstag), bei höherer Belastung täglich über die Mittagspause.



1 Vorreinigung

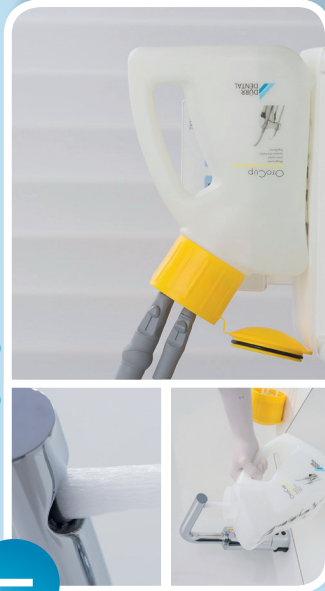


2 Liter Wasser absaugen

2 Dosierung 5%



Ansetzen einer 5%-igen Lösung:
1 Liter Wasser + 50 ml MD 555 cleaner

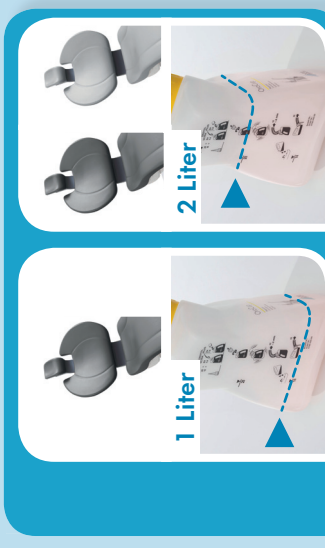

Pro Behandlungseinheit:
1 Liter Wasser + 2,5 Kappen MD 555 cleaner (50 ml)
Bei 2 Behandlungseinheiten:
2 Liter Wasser + 5 Kappen MD 555 cleaner (100 ml)

3 Absaugung



Saugschläuche aufstecken, 2 oder 1 Liter Lösung absaugen

4 Reinigung Mundspülbecken



Mindestens 250 ml Lösung pro Mundspülbecken

5 Einwirkzeit



30 bis 120 Minuten einwirken

6 Spülung Behandlungseinheit



Bei Wiederinbetriebnahme 2 Liter Wasser absaugen

